

ACCU-CHEK® FastClix



קליק אחד,
דקירה בלחיצה אחת -
פשוט!



טל: 04-6175390


www.dyndiabetes.co.il

לרכישת הדוקרן ותופי מחטים:

www.dynstore.co.il

דין דיאגנוסטיקה - ערוץ הסוכרת 

ACCU-CHEK®

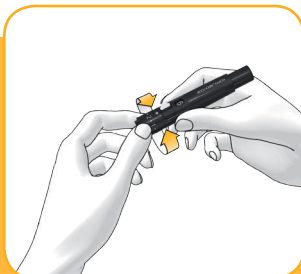

בחירת עומק חדירת המחט מבין 11 אפשרויות



שטיפת ידיים במים וסבון

הכנסת התוף



החזרת הכיסוי



הכנסת תוף המחטים כאשר
הצד הלבן פונה אל תוך הדוקרן




הסרת הכיסוי

החלפת מחט

הוצאת דגימת דם



להחלפת מחט - יש להעביר את הידית קדימה ולאחור

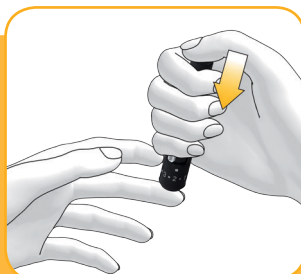

דקירה בלחיצה אחת. פשוט!

תוף המחטים מכיל 6 מחטים שאינן נראות. הקפידו להשתמש בכל 6 המחטים טרם הוצאת התוף מהדוקרן. לא ניתן לעשות שימוש חוזר בתוף שהוצא מהדוקרן.



תוף חדש



תוף משומש

דקירה בקליק אחד- קצות האצבעות יאמרו לך תודה!